

	TECHNICAL DATA SHEET	
	DETERGENTE DESINF. ASPIRACION	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

PRODUCT	DETERGENTE DESINF. ASPIRACION PROC	
REFERENCE	49900	
COMPANY	USF Healthcare S.A. Rue Francois Perreard 4 Case postale 142 CH-1225 Chene Bourg - Geneve	
CLASSIFICATION	CLASS IIa MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	

Indicaciones:

Solución detergente desinfectante para la limpieza y desinfección diaria de los sistemas de aspiración dentales.

Características principales del producto:

- Producto concentrado.
- Formula no espumante.
- Amplio espectro de actividad antimicrobiana desde 5 minutos.
- Económico: dilución al 2% o sea 1L = 50L.
- Triple acción: limpia, desincrusta e desinfecta.
- Compatible con todos tipos de sistemas de aspiración.
- Puede ser utilizado para escupideras y separadores de amalgamas.
- Eficacia comprobada sobre biofilm según la norma ISO/TS 15883 – 5: 2006.
- pH del producto puro: ≈ 10.5.
- Color rojo / sin perfume.
- No clasificado como peligroso para el medio ambiente a la dosis de empleo.

**Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

Composición:

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropano-1,3- diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente quelante, colorante et excipientes.

	TECHNICAL DATA SHEET	
	DETERGENTE DESINF. ASPIRACION	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

Propiedades microbiológicas:

- Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 15 minutos.
- Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 – 60 minutos.
- Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 15 minutos.
- Activo según EN 14476 sobre BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus, virus Vaccinia – 5 minutos.

Acondicionamiento:

- Envase de 1 litro.
- Garrafa de 5 litros con bomba dosificadora.

Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

1. Diluir al 2% en una cuba para tener 2 litros de solución (40 ml para 2 litros de agua).
2. Aspirar la solución diluida.
3. Dejar que la solución actúe durante 15 minutos, como mínimo.
4. Enjuagar el sistema aspirando 1 litro de agua limpia, como mínimo.

Precauciones de uso:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIa, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +25°C.