

El sistema lingual **Ideal Leone** ha sido expresamente creado para tratar pacientes con malposiciones leves o recidivas, que desean mejorar su sonrisa con un tratamiento invisible, predecible y rápido.



- Los brackets del sistema lingual **Idea-L** tienen dimensiones mesio-distales mínimas y un espesor de sólo 1,4 mm para asegurar el confort y no alterar la fonación del paciente desde el primer día de tratamiento. El diseño especial de estos brackets simplifica el posicionamiento de la ligadura **Slide™** y garantiza el mantenimiento de la posición durante la terapia.



- El uso de la ligadura **Slide™** presenta múltiples ventajas:
 - **Slide™** se integra en el perfil del bracket haciéndolo libre de asperezas
 - **Slide™** aprovecha las ventajas de la biomecánica Low Friction aplicando fuerzas ligeras
 - **Slide™** reduce los tiempos terapéuticos.



- En la mayoría de los casos el uso de un alambre redondo **Memoria®** .012" es suficiente para obtener la solución del apiñamiento y la mejora estética de la sonrisa. En presencia de rotaciones dentales y/o malposiciones más marcadas se pueden utilizar tanto alambres de dimensiones mayores, **Memoria®** o Beta **Memoria®**, como ligaduras convencionales de fricción para aumentar el control biomecánico.



- El sistema **Idea-L**, estudiado para una biomecánica 2D con el uso de sólo alambres redondos, no requiere difíciles y costosas elaboraciones de modelos.



- Para obtener perfectos alineamiento y nivelación de los dientes anteriores es necesario un posicionamiento cuidadoso de los brackets; es aconsejable por lo tanto una técnica indirecta tanto con cubetas de transferencia realizadas en laboratorio como con los "Jig" expresamente ideados.

- La serie de altímetros de plástico es realizada en seis medidas para permitir la elección de la posición más correcta, en virtud de la anatomía de la superficie lingual del diente.




- Unión del altímetro al bracket que tiene la ligadura **Slide** aplicada en la aleta gingival




- Comprobación sobre el modelo de la medida del altímetro elegido



- Posicionamiento en boca y polimerización del adhesivo

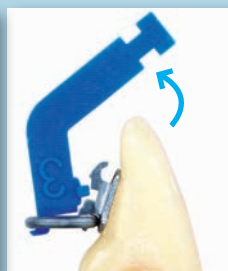

- Remoción del altímetro con un movimiento de rotación

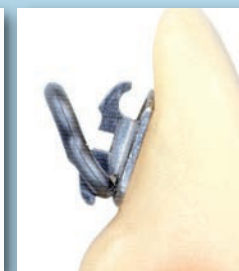

- **Bracket sin "Jig" con la ligadura Slide aplicada en la aleta gingival**



- Bracket con el alambre introducido y la ligadura **Slide** posicionada

*patentado

..llevo
un aparato
ortodóntico..

¿lo dirías?

ideal Leone
O LIGHT LINGUAL SYSTEM

Inicio del tratamiento



Resultado clínico a los 3 meses



- Cosmética ortodóntica de la sonrisa rápida e invisible para la cura de malas posiciones leves y recidivas
- Biomecánica Low Friction 2D para alinear y nivelar los dientes anteriores en pocas semanas
- Brackets de reducidas dimensiones y espesor, utilizados con ligaduras *Slide*TM, aseguran el máximo confort para el paciente
- Posicionamiento práctico y preciso con el especial sistema de transferencia
- Eficaz alternativa a los aligners transparentes
- Máximo respeto por la fonación
- Mínima colaboración del paciente

Inicio del tratamiento



Resultado clínico a los 3 meses

