

schülke →



Puissant détergent pour le nettoyage et l'entretien des systèmes d'aspiration.

aspirmatic[®] cleaner

Notre plus

- Sans aldéhyde.
- Odeur très agréable
- Non moussant - non colorant
- Produit 2 en 1 : système d'aspiration + crachoir
- Excellentes performances de nettoyage
- Excellente matéro-compatibilité
- Destruction du biofilm

Domaines d'utilisation

Pour le nettoyage hebdomadaire et complémentaire du système d'aspiration, du crachoir et des conduites d'écoulement du cabinet dentaire.

Conseils d'utilisation

- Verser d'abord l'eau dans l'aspirmatic[®] system jusqu'au niveau 1900 ml.
- Verser 100 ml d'aspirmatic[®] cleaner dans l'eau pour obtenir 2 l de solution à 5 %.
- Positionner les tuyaux d'aspiration sur les embouts adaptateurs de l'aspirmatic[®] system.
- La solution est aspirée automatiquement. Il restera systématiquement 600 ml de solution dans l'aspirmatic[®] system.
- Verser la solution restante dans le crachoir afin de nettoyer l'évacuation.
- Laisser agir la solution 1 à 2 heures. Faire couler de l'eau claire dans les circuits pour éliminer les souillures dissoutes.
- En présence de nombreuses impuretés, l'eau doit être versée directement après le traitement



Données relatives au produit

Composition :

100 g d'aspirmatic® cleaner contiennent : acides organiques, tensioactifs non ioniques, inhibiteurs de corrosion, colorants.

Étiquetage selon le règlement (CE) n° 648/2004: <5% de tensioactifs non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur	jaune
Densité	env. 1,17 g/cm ³ / 20 °C
pH	0,9 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	> 100 °C / Méthode : ISO 2719
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Remarques particulières

Utiliser les DM avec précaution.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
aspirmatic cleaner 2 l FL	5/Carton	150302
aspirmatic cleaner 2L	5/Carton	150303

Informations environnementales

schülke est une société engagée dans une gestion durable et responsable de nos ressources naturelles, de notre environnement et de notre santé. Notre système de management environnemental lancé en 1996 conditionne toutes nos activités au quotidien, et nos efforts sont régulièrement récompensés par les instances environnementales allemandes et internationales (EMAS, ECO AUDIT et Responsible Care).

Avis d'expert et information

Les documents relatifs au produit sont disponibles sur simple demande à l'adresse suivante :

schuelkefrance.info@schuelke.com

Ou auprès de votre contact commercial personnalisé.

Retrouvez toutes les nouveautés et informations diverses sur notre site internet : www.schuelke.fr

aspirmatic® cleaner est un dispositif médical de classe I.
Marquage CE (organisme certificateur : DQS 0297).
Produits fabriqués par Schülke & Mayr GmbH
(Robert-Koch Str 2 | 22851 Norderstedt | Allemagne)



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 0-150-10003



ISO 9001:2008



ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

Schülke France
Schülke France SARL
Route de Varennes
71100 Chalon-sur-Saône
France
Tél +33 3 85 92 30 00
www.schuelke.fr
schuelkefrance.info@schuelke.com

Siège
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com