



Fiche technique

Désignation	Resina C&B PROCLINIC	
Référence	35-19P (teinte A3) 35-18P (teinte A2)	
Description	Resina C&B est une résine auto-polymérisable pour l'élaboration de bridges et couronnes provisoires.	
Classification	Resina C&B est un dispositif de classe IIa d'après la règle 7. "Tous les dispositifs invasifs de type chirurgical destinés à un usage à court terme appartiennent à la classe IIa," <i>Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et modifiée par la Directive 2007/47/CE of 5 Septembre 2007.</i>	
Composition	Les résines temporaires contiennent une matrice de méthacrylate résineux et des charges minérales.	
Caractéristiques	Résistance à la flexion Degré de transformation à 48h Solubilité dans l'eau (7 jours) Absorption d'eau (7 jours) Stabilité de la couleur à 90 jours Viscosité Couche d'inhibition Temps de prise à 22 ° c (auto polymérisation) 110 MPa 56 % ≤ 7.5 µg/mm³ ≤ 40 µg/mm³ ΔE = 1.9 Thixotrope < - 16 mg 2'25" - 2'30"	
Indication	En raison de sa consistance particulière, de son réglage rapide et de ses excellentes qualités mécaniques, Resina C & B convient parfaitement aux couronnes provisoires ou aux petits ponts esthétiques, réalisés uniquement à partir d'une pré-impression.	
Mises en garde	➤ Resina C&B contient des méthacrylates qui peuvent être irritants pour la peau, les yeux et les muqueuses buccales, ils peuvent entraîner des dermatites allergiques de contact chez les personnes à risque. ➤ Eviter tout contact avec les yeux afin de prévenir toute irritation et dommage potentiel au niveau de la cornée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin. ➤ Eviter tout contact avec la peau pour prévenir toute irritation et réaction allergique potentielle. En cas de contact, des rougeurs peuvent apparaître sur la peau. Si un contact avec la peau se produit, éliminer immédiatement le matériau à l'aide d'un coton et laver complètement à l'eau et au savon. Si un érythème cutané avec sensibilisation ou d'autres réactions allergiques apparaissent, cesser l'utilisation du produit et consulter un médecin.	
Contre-indication	Resina C&B is contraindicated in patients with a history of allergic reaction to methacrylate resins or any other of the components.	
Précaution	Porter des lunettes, un masque, des vêtements et des gants de protection. Le port de lunettes de protection est recommandé pour les patients.	
Stockage & durée de vie	Conserver à une température inférieure ou égale à 25°C. Ne pas exposer aux rayons du soleil ou à des sources de chaleur. Dans ces conditions, la durée de vie de ce produit est de 24 mois	
Conditionnement	50ml cartouche dual + 10 embouts mélangeurs jaunes	