

Variolink® Esthetic

Composite de collage esthétique

**UNE ESTHÉTIQUE
ÉTONNANMENT
SIMPLE !**

Recommandé pour
IPS e.max®
CAD/Press

Recommandé pour
Tetric® CAD



ivoclar
vivadent
passion vision innovation


Variolink® Esthetic



Variolink Esthetic est un composite de collage hautement esthétique photopolymérisable ou dual indiqué pour le collage définitif des restaurations en céramique ou en composite.



Une esthétique exceptionnelle

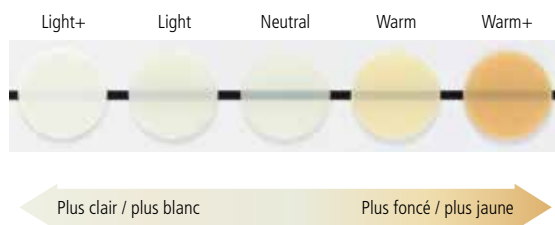


Le concept de teinte Effect

Afin de faire correspondre précisément l'effet de teinte de la restauration avec celui des dents naturelles adjacentes, Ivoclar Vivadent a développé un nouveau système de teintes Effect optimisé. La teinte "Neutral" présente la translucidité la plus élevée, elle est ainsi adaptée à un collage sans effet de teinte sur la restauration. Les teintes "Light" et "Light+" apportent un effet de luminosité graduel, tandis que les teintes "Warm" et "Warm+" tendent à assombrir de manière progressive la restauration en céramique ou en composite.

Excellente stabilité de teinte



Variolink Esthetic fait preuve d'une exceptionnelle stabilité de teinte. Ceci est rendu possible grâce à la présence du photo-initiateur breveté Ivocerin®, totalement exempt de co-initiateurs à base d'amines. Variolink Esthetic garantit ainsi des résultats esthétiques durables et fiables. Même exposé à la lumière intense ou à un environnement humide, Variolink Esthetic n'est pas sujet à des variations de teinte visibles.

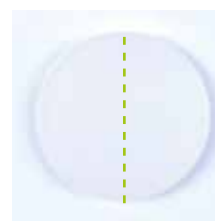

Variolink Esthetic Test d'exposition à la lumière (conforme ISO 4049), partie gauche exposée



Référence Variolink Esthetic Après immersion dans l'eau

L'exceptionnelle esthétique de Variolink Esthetic est également due à sa fluorescence naturelle similaire à celle de la dent naturelle. De plus, ce composite de collage est très résistant à l'abrasion, garantissant ainsi une bonne intégrité marginale de la restauration en bouche.



Une mise en œuvre simple

Une élimination facile des excès

Auparavant, les composites de collage étaient assez difficiles à utiliser en raison de la difficulté à éliminer les excès de matériau.

Désormais, Variolink Esthetic établit une nouvelle référence en la matière. L'association astucieuse du photo-initiateur Ivocerin et d'un réducteur de sensibilité à la lumière ambiante (retardateur de prise) permet au praticien de retirer facilement l'excès de matériau après une pré-polymérisation efficace à l'aide d'une lampe.



Pour de plus amples détails, regardez la vidéo : www.ivoclarvivadent.com/vleien



Une viscosité adaptée à la situation


Le contrôleur de viscosité combine de manière optimale la bonne fluidité du matériau et sa stabilité. La colle s'extrude sans effort de la seringue. Les excès fluent aisément à travers le gap lors de l'assemblage, mais restent stables au niveau du joint pour être facilement retirés.

Pour de plus amples détails, regardez la vidéo : www.ivoclarvivadent.com/vlewen



Un radiodiagnostic efficace

Variolink Esthetic reste dans la tradition de son prédécesseur Variolink II en offrant une radio-opacité similaire. Cette radio-opacité élevée permet une détection fiable des excès de matériau et des caries secondaires.

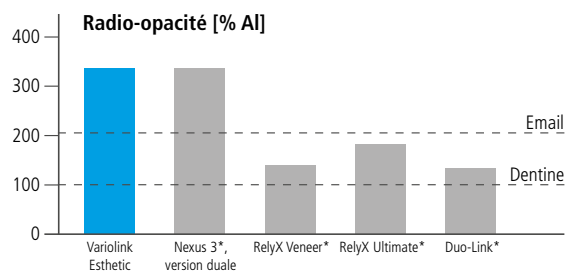

* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG.
Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014 (mesures conformes à ISO 4049).

Le succès clinique en un système




Une adhésion optimale

Adhese® Universal est un adhésif universel mono-composant photopolymérisable pour restaurations directes et indirectes. Grâce à sa présentation unique en VivaPen®, il complète idéalement Variolink Esthetic pour l'assemblage des restaurations hautement esthétiques. Compatible avec toutes les techniques de mordantage, il permet au praticien de s'adapter en toute flexibilité à chaque indication clinique. L'application d'Adhese Universal n'étant pas influencée par la technique propre à chaque utilisateur, la force d'adhésion est constante et les risques de sensibilités post-opératoires sont minimisés.

Variolink Esthetic peut également être utilisé avec les adhésifs Syntac® et ExcITE® F.

Résistance au cisaillement après polymérisation duale – mordantage sélectif de l'émail sur émail et dentine après 10 000 thermocycles

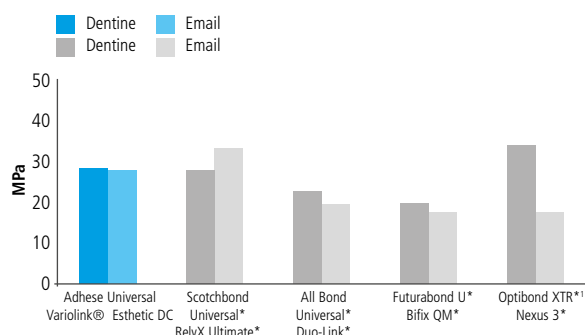

¹ Technique d'automordantage, car Optibond XTR n'est pas indiqué pour le mordantage sélectif de l'émail.

* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG.
Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2013 – 2015


Une solution idéale pour les restaurations en vitrocéramique

L'association de Variolink Esthetic au premier primer automordant pour vitrocéramique au monde, Monobond Etch & Prime®, permet d'obtenir une excellente adhésion sur les restaurations en vitrocéramique telles que IPS e.max® CAD/Press ou IPS Empress® CAD/Esthetic.

Ce primer monocomposant pour céramique mordance et silanise les surfaces vitrocéramique en une seule étape. L'étape contraignante de mordantage à l'acide fluorydrique est donc supprimée du protocole.



Résistance à l'arrachement sur vitrocéramique au disilicate de lithium IPS e.max® CAD initiale et après vieillissement

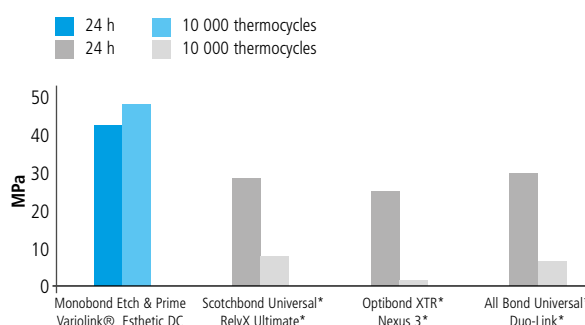


* Ne sont pas des marques déposées par Ivoclar Vivadent AG.
Source : R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, 2014



Des utilisateurs enthousiastes

Dans un sondage réalisé auprès d'utilisateurs, 96 % des participants étaient satisfaits ou très satisfaits de Variolink® Esthetic. Ils ont été particulièrement impressionnés par les propriétés esthétiques et les valeurs d'adhésion de ce composite de collage. La consistance et la facilité d'utilisation du matériau ont également été largement reconnues. 98% des personnes ayant testé Variolink Esthetic l'ont intégré dans leur pratique quotidienne.

Méthode d'évaluation des caractéristiques les plus importantes du produit :

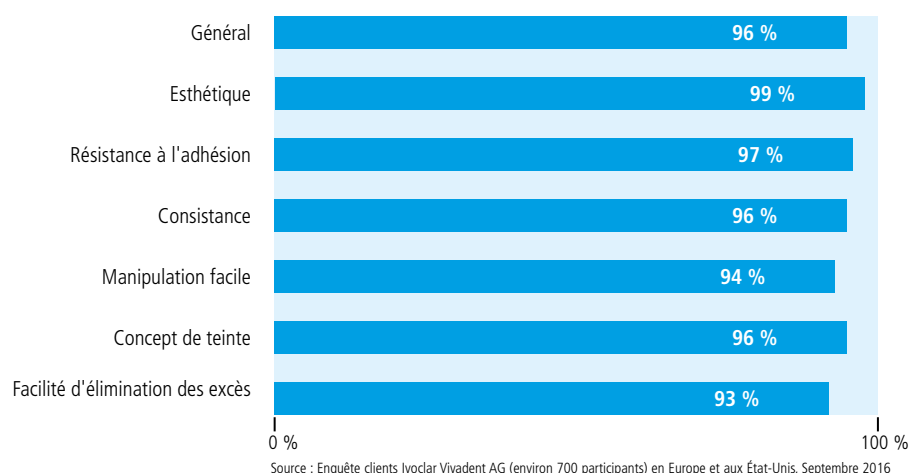

Des experts impressionnés



” Les colles de la gamme Variolink m’ont toujours apporté une très grande satisfaction, et en particulier la génération Variolink Esthetic. La version LC (photopolymérisable) convient parfaitement pour le collage esthétique des facettes céramiques.

”

Dr Stéfien KOUBI
Marseille



” Variolink Esthetic me satisfait pleinement dans mon exercice quotidien. Je trouve le protocole d’utilisation particulièrement ergonomique et reproductible.

”

Dr Jean-Christophe PARIS
Aix-en-Provence



” Le composite de collage Variolink Esthetic m’apporte entière satisfaction pour l’assemblage adhésif des restaurations céramiques. J’apprécie particulièrement le rendu esthétique du joint de colle en teinte Warm lorsqu’il est en zone visible.

”

Dr Olivier ETIENNE
Strasbourg



” Depuis plus de 2 ans, j’assemble mes facettes en céramique ainsi que mes onlays (en céramique ou en composite) avec Variolink Esthetic. En fonction du mode de polymérisation souhaité, j’utilise le coffret System Kit LC ou DC. À ce jour, je suis ravi des résultats esthétiques, et mes patients aussi !

”

Dr Frédéric RAUX
Paris



” J’utilise quotidiennement Variolink Esthetic pour le collage des restaurations CFAO. J’apprécie particulièrement sa viscosité assurant une insertion passive et des excès qui ne coulent pas. Cela me permet de gérer sereinement l’élimination des excès de colle par prépolymérisation (flash de lampe).

”

Dr Stéphane CAZIER
Paris





Présentations

Variolink Esthetic LC System Kit (photopolymérisable uniquement)

3 seringues de Variolink Esthetic LC, 2 g (Light, Neutral, Warm)
3 seringues de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Light, Neutral, Warm)
1 seringue de Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, ou 1 flacon, 5 g
1 flacon Monobond Plus, 5 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

666433 avec Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666065 avec Adhese Universal flacon, 5 g

Variolink Esthetic DC System Kit (polymérisation duale)

3 seringues de Variolink Esthetic DC, 5 g (Light, Neutral, Warm)
3 seringues de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Light, Neutral, Warm)
1 seringue de Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml, ou 1 flacon, 5 g
1 flacon Monobond Plus, 5 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

666434 avec Adhese Universal VivaPen, 2 ml

666125 avec Adhese Universal flacon, 5 g

Variolink Esthetic LC System Kit IPS e.max (photopolymérisable uniquement)

3 seringues de Variolink Esthetic LC, 2 g (Light, Neutral, Warm)
3 seringues de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Light, Neutral, Warm)
1 seringue de Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
1 flacon Monobond Etch & Prime, 5 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

681493

Variolink Esthetic DC System Kit IPS e.max (polymérisation duale)

3 seringues de Variolink Esthetic DC, 5 g (Light, Neutral, Warm)
3 seringues de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Light, Neutral, Warm)
1 seringue de Total Etch, 2 g
1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml
1 flacon Monobond Etch & Prime, 5 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

681492

Variolink Esthetic DC Starter Kit (polymérisation duale)

1 seringue automélangeante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (Neutral)
1 seringue de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Neutral)
1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
1 flacon Monobond Plus, 1 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

687593

Variolink Esthetic DC Starter Kit IPS e.max (polymérisation duale)

1 seringue automélangeante Variolink Esthetic DC, 2,5 g (Neutral)
1 seringue de pâte d'essayage Variolink Esthetic, 1,7 g (Neutral)
1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml
1 flacon Monobond Etch & Prime, 1 g
1 seringue de Liquid Strip, 2,5 g
Divers accessoires

687592

Réassort Variolink Esthetic LC (photopolymérisable uniquement)

1 seringue, 2 g (dans la teinte choisie)
5 embouts d'application
666126 Light+
666127 Light
666128 Neutral
666129 Warm
666130 Warm+

Réassort Variolink Esthetic DC (polymérisation duale)

1 seringue automélangeante, 5 g (dans la teinte choisie)
10 embouts de mélange
666117 Light+
666118 Light
666119 Neutral
666120 Warm
666121 Warm+

Réassort Variolink Esthetic DC (polymérisation duale)

1 seringue automélangeante, 9 g (dans la teinte choisie)
15 embouts de mélange
666122 Light
666123 Neutral
666124 Warm

Réassort Variolink Esthetic DC, refill x3 seringues (polymérisation duale)

3 seringues automélangeantes, 9 g (de la même teinte choisie)
45 embouts de mélange
692424 Light
692425 Neutral
692426 Warm

Réassort pâte d'essayage Variolink Esthetic Try-In Paste

1 seringue, 1,7 g (dans la teinte choisie)
5 embouts d'application
666067 Light+
666113 Light
666114 Neutral
666115 Warm
666116 Warm+

Accessoires

645951 Embouts de mélange, courts fuselés, réassort de 15
559224 Embouts d'application Variolink, réassort de 20

De multiples indications

Produit	Variolink® Esthetic	
Mode de polymérisation	LC photo- polymérisable¹	DC polymérisation duale
Adhésif recommandé	Adhésif : Adhese® Universal	
Vitrocéramique ex. IPS Empress®		
Facettes	✓	✓
Inlays / Onlays / Couronnes partielles	✓	✓
Couronnes		✓
Disilicate de lithium ex. IPS e.max® CAD / Press		
Facettes (facettes occlusales)	✓	✓
Inlays / Onlays / Couronnes partielles	✓	✓
Couronnes / Bridges		✓
Céramiques cristallines (oxyde de zirconium) ex. IPS e.max® ZirCAD		
Couronnes / Bridges		✓
Tenons radiculaires		
Céramiques hybrides et composites ex. Tetric® CAD		
Facettes	✓	✓
Inlays / Onlays	✓	✓
Couronnes		✓
Tenons radiculaires (ex. FRC Postec® Plus)		
Métal / Céramo-métal		
Inlays / Onlays / Couronnes partielles		✓
Couronnes / Bridges		✓
Bridges Maryland		✓
Tenons radiculaires		

¹ Restaurations d'une épaisseur < 2 mm et suffisamment translucides

Cementation Navigation System

Laissez-vous guider dans le labyrinthe du collage

L'application multimédia Cementation Navigation System vous aide à choisir le matériau de collage approprié à chaque situation clinique, que ce soit sur structure dentaire naturelle ou piliers implantaires. De plus, CNS vous donne un aperçu de tous les matériaux de solidarisation disponibles chez Ivoclar Vivadent.

Des animations claires et détaillées vous offrent une vue complète de la procédure, de la dépose de la restauration provisoire à l'application topique de fluorure.

www.cementation-navigation.com



- animations 3D détaillées
- protocole étape par étape
- navigation intuitive





Prothèse fixe

Variolink® Esthetic fait partie des produits de la catégorie prothèses fixes. Les produits de cette catégorie couvrent l'ensemble de la procédure de réalisation des prothèses fixes, des provisoires à l'entretien des prothèses. Ces produits sont coordonnés les uns aux autres de manière optimale et permettent une mise en œuvre et une application réussies.



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES :

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



La solution complète pour toutes les indications

- Matériaux hautement esthétiques et hautement résistants pour les techniques de pressée et de CFAO
- Céramiques au disilicate de lithium (LS₂) et zircons (ZrO₂) pour les restaurations dentaires, des facettes pelliculaires aux bridges longue portée
- Flexibilité d'assemblage : collage adhésif, collage auto-adhésif, scellement

Fluor Protector S

Vernis prophylactique fluoré



Vernis protecteur homogène en tube

- Fluoruration immédiate de l'émail
- Protection contre l'érosion et la carie
- Goût agréable

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits de la gamme « Prothèse Fixe » ? Contactez simplement votre interlocuteur Ivoclar Vivadent ou visitez notre site internet www.ivoclarvivadent.fr.

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Variolink Esthetic, IPS e.max, Tetric, Adhese Universal, Syntac, Monobond Etch&Prime, Monobond Plus, IPS Empress, Total Etch, Telio, sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Liquid Strip est un dispositif médical de Classe I / CE fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur l'étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

ivoclar
vivadent
passion vision innovation