



PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Ceram-Safe®

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1

L'utilisation d'une digue est fortement recommandée

2

Nettoyer préalablement la zone à traiter

3

Rendre la surface rugueuse

4

Rincer abondamment à l'eau

5

Sécher avec un flux d'air exempt d'eau et d'huile

6

Mordançage

7

Rincer abondamment à l'eau

8

Appliquer le mélange Ceram-Safe en couche fine au pinceau

9

Sécher avec un flux d'air exempt d'eau et d'huile

10

Appliquer un composite selon instructions du fabricant

Avant ⌚ 30 min. max

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.