



POLI-R

Description

Gel pour le polissage des résines acryliques avec bactéricide.

Utilisation

POLI-R est une préparation en gel pour le polissage et le lustrage de tous types de résines en une seule opération.

Il peut être appliqué indifféremment à l'aide de cônes en feutre, de brosses en soie ou de tissus en coton.

Avantages

Grande rapidité de polissage
Faible teneur en poussière ambiante
Contient un bactéricide
Il peut être dilué avec de l'eau distillée

Mode d'emploi

Avant utilisation, mélanger le produit à l'aide d'une spatule jusqu'à l'homogénéité. Un dépôt solide peut apparaître au fond du pot durant le stockage.

Appliquer directement le gel sur la prothèse et polir à une vitesse maximale de 1.500 tours minute.

Si le cône utilisé pour polir contient des résidus secs, il est nécessaire de le mouiller, ces restes secs pouvant rayer la résine.

Si l'on observe un durcissement du produit (par évaporation d'eau), il est possible d'ajouter de l'eau distillée jusqu'à obtenir la consistance désirée.

Pour un brillant intense, il est recommandé de réaliser un dernier passage à l'aide d'une brosse en toile de coton.

Si l'on observe encore quelques rayures, finir le polissage avec le produit POLI-B

Le polissage terminé, rincer la pièce à l'eau.

Stockage et date limite d'utilisation.

Stabilité du produit: de 2 ans (selon le respect des instructions de conservation).

Fermer l'emballage après chaque utilisation.

Stockage: Conserver le produit bien fermé dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec.

Conditionnement

7880-001	Boîte	1 Kg
7880-M10	Echantillon	120 gr

Note:

Les informations contenues sur cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sont données à titre de valeur indicative.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA, SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
protechno@protechno.com
www.protechno.com