



PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Exo[®]-Free HP

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

**Solution prête
à l'emploi**


**SANS
ALCOOL**

1



Déverrouiller la
sécurité du spray et
pulvériser Exo-free HP
sur un support non tissé

2

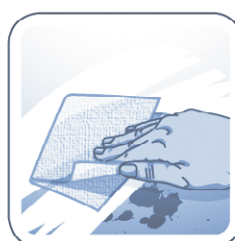

Nettoyer par essuyage
mécanique. Ne pas rincer !
(sauf muqueuses et denrées
alimentaires)

Temps de contact

⌚ 15 min.

3



Jeter les lingettes
souillées et
verrouiller la sécurité

4



Répéter l'opération
de désinfection
chaque fois
que nécessaire.

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.