


RÉSINES DE REBASAGE.

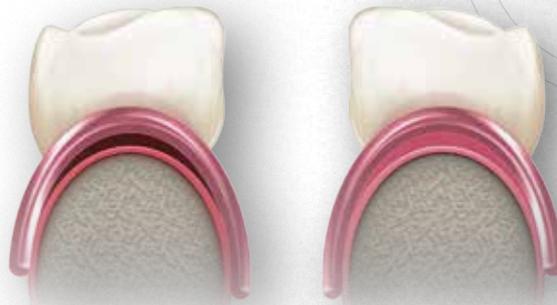

Rebasages

CONFORTABLES ET DURABLES

en une seule séance



REBASAGES
PROCLINIC EXPERT

SOLUTIONS COMPLÈTES

**Rebasage souple
Proclinic Expert**

En tubes
et en cartouche

**Rebasage dur
Proclinic Expert**

En cartouche

Rebasage total	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rebasage partiel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prothèse provisoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prothèse définitive	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Support et confort accrus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension de prothèse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prolongation des bords de la prothèse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptation en couches	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Atrophie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ulcérations	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inflammation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Postopératoire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REBASAGES PROCLINIC EXPERT

Les rebasages **Proclinic Expert** vous permettent d'améliorer le confort, la stabilité et le manque de rétention des dentiers de vos patients, de façon rapide, simple et durable, en une seule séance.



1

Préparation
de la prothèse




2

Application
de l'adhésif



3

Application du
rebasage

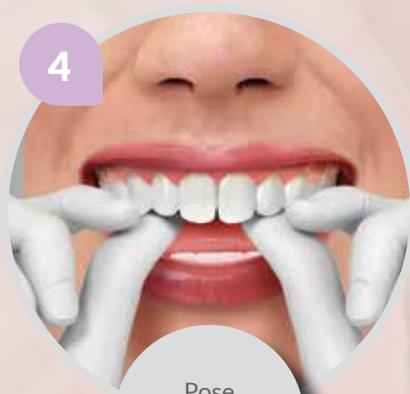

4

Pose
de la prothèse
en bouche




5

Vernissage
et polissage

REBASAGE SOUPLE PROCLINIC EXPERT

Mettez fin à l'inconfort lors de la mastication

Le **Rebasage Souple Proclinic Expert**, en silicone A, vous donne une élasticité durable qui absorbe les pressions et les redistribue pour les amortir. Sa teinte est stable dans le temps et garantit un confort maximal pour votre patient en une seule séance, sans odeur ni saveur.

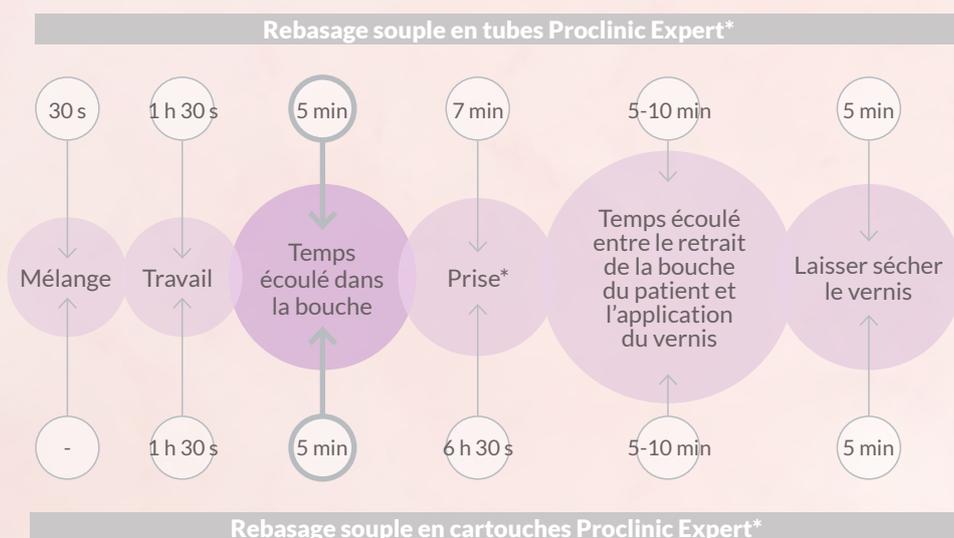

D^r Vincenzo Dominijanni
Spoleto, Perugia (Italie).

« Après avoir essayé d'autres rebasages qui ont commencé à dégager une forte odeur quelques semaines plus tard, j'ai décidé d'essayer le Rebasage Souple Proclinic Expert en cartouches, qui a été rapide et facile à appliquer.

Lorsque j'ai retiré la prothèse de la bouche, j'ai constaté une surface brillante et polie qui a facilité la retouche finale. Un mois après le traitement, la prothèse est en excellent état, avec une surface brillante, homogène et consistante ; de plus, comme le souligne le patient, il est dépourvu de saveur et d'odeur par rapport aux rebasages précédents. »



REBASAGE DUR
PROCLINIC EXPERT

Obtenez des résultats durables

Le **Rebasage Dur Proclinic Expert** en cartouche automix offre une solution simple et rapide pour une réparation complète en une seule séance.

Il adhère fermement à toutes sortes de dentiers acryliques, ce qui en fait un traitement efficace et durable, sans perte d'esthétique ni de teinte au fil du temps.

1%

Très faible absorption de liquides

TEINTE INITIALE EXPOSÉ AU CAFÉ



Échantillon plongé dans du café pendant 5 jours à 27 °C

EXCELLENTE STABILITÉ CHROMATIQUE

TRÈS FAIBLE
SOLUBILITÉ

FORCE
D'ADHÉSION | 25 MPa



Rebasage Souple Proclonic Expert en tubes

- Rebasage rapide en une seule séance
- Matériau constamment élastique
- Sans odeur ni saveur

KIT. 1 tube de base 50 ml, 1 tube catalyseur 50 ml, adhésif 5 ml, vernis 2 x 7 ml (base + catalyseur), 2 pipettes

Réf. 41522

Remplacement de tubes : base 50 ml, catalyseur 50 ml

Réf. 41523

Adhésif 5 ml pour tubes

Réf. 41525

Rebasage Souple Proclonic Expert en cartouches

- Rebasage rapide en une seule séance
- Matériau constamment élastique
- Sans odeur ni saveur

KIT. Cartouche 50 ml, adhésif 5 ml, vernis 2 x 7 ml (base + catalyseur), 7 embouts, 2 pipettes

Réf. 41520

Remplacement de cartouche 50 ml

Réf. 41521

Adhésif 5 ml pour cartouches

Réf. 41524



Rebasage Dur Proclonic Expert

- Bonne force d'adhésion
- Réparation durable
- Teinte stable dans le temps

KIT. Cartouche 50 ml, adhésif 15 ml, 6 embouts mélangeurs, 6 brochettes d'application, 6 pipettes de distribution

Réf. 41526

www.proclonic-products.com

info@proclonic-products.com