



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Océan Putty SH


Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *



Se laver les mains



Réaliser un
mélange homogène
1/1

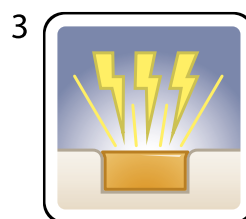


Polymérisation


 Prise normale **3 min.**
 Prise rapide **2 min.**



Pas de gant

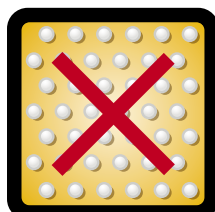

Pas de talc



Ne pas intervertir
les couvercles



Ne pas intervertir
les cuillères

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.