



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Ocean Up-Soft

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1




Se laver les mains

2



Réaliser un
mélange homogène
1/1

3

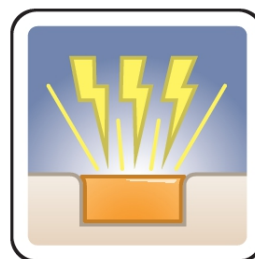


Polymérisation



Prise normale **3 min.**
Prise rapide **2 min.**



Pas de gant

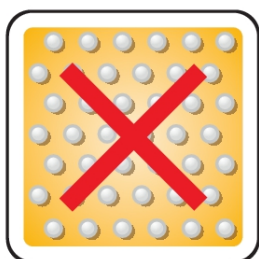

Pas de talc



Ne pas intervenir
les couvercles



Ne pas intervenir
les cuillères

risques de contamination des pâtes

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.