



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Gingi-Dry

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Rincer minutieusement
le sulcus

2




Sécher légèrement
à l'air

3



Appliquer dans le sulcus
tout autour
de la préparation

4

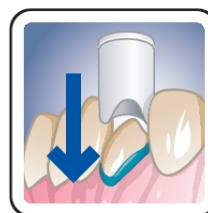

Positionner la coiffe.
Maintenir
la compression.

Laisser agir
 **2 min.**

5



Nettoyer minutieusement
le sulcus
(air/eau/aspiration)



Un temps de contact
trop long peut
endommager
le tissu gingival.
Ne pas avaler.

Conserver Gingi-Dry
dans son sachet
aluminium.



Replacer le bouchon
immédiatement
après usage

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.