



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Safety-Cal

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1. Coiffage direct ou indirect :

1



Appliquer une fine couche

2



Laisser sécher
ou
Sécher très délicatement

3



Obturer la cavité


2. Traitements canaux :

1



Préparer et nettoyer
le canal radiculaire

2

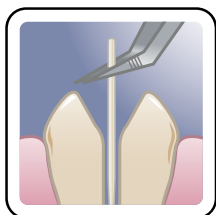


Sécher modérément
avec une pointe papier

3



Appliquer le produit
avec un bourre-pâte

4

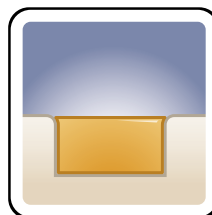

Obturer provisoirement
le canal radiculaire

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.