



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



NEONITI

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *



Idéal pour
perméabilisation
difficile

1. Réaliser le cathétérisme

- Préparer la cavité d'accès.
- Déterminer la longueur de travail "LT".



OPTIONNEL

2. Élargir l'entrée canalaire

- Éliminer les interférences dentinaires.
- Mouvements de brossage pariétal.



Mise en forme
des canaux
difficiles

Optionnel :
Finition des
canaux larges

3. Mettre en forme le canal jusqu'à LT

- Passer A1 jusqu'au tiers médian en 3-4 mouvements de brossage pariétal.
- Confirmer à nouveau LT avec une lime K.
- Passer A1 jusqu'à LT (mouvements de va-et-vient axial).



	C1	GPS	A1	A1	A1
Diamètre	n°25	n°15	n°20	n°25	n°40
Conicité	12	03	06	06	04
Long. (mm)	15		21 / 25 / 31		

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.