



PROTOCOLE ILLUSTRÉ




Exo[®]-Drill

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

Protocole identique
pour usage en
bac à ultrason.

**Solution
prête
à l'emploi**

1

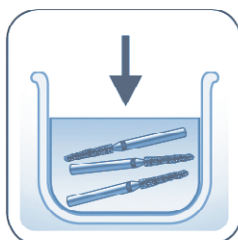

**Immerger
les instruments**


⌚ 15 min.

2




**Rincer
abondamment**

3

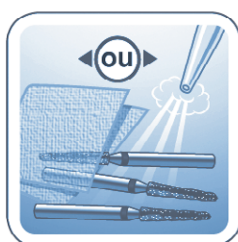

**Sécher avec un textile
non tissé ou par
insufflation d'air
microbiologiquement
maîtrisé**

4

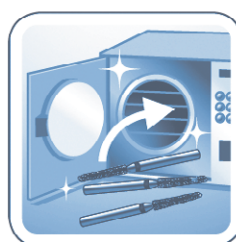

**Stériliser
à l'autoclave**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.