



PROTOCOLE ILLUSTRÉ




# Exo<sup>®</sup>-Aspi

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! \*


**Dilution 0,5%**

1

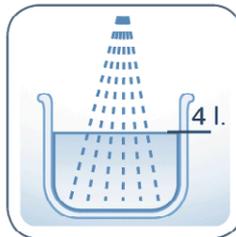

**20 ml / 4 litres d'eau**

2

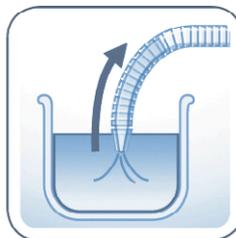

**Aspirer la solution**

**Laisser agir**

 **15 min.**

3



**Rincer  
abondamment  
avec l'eau du réseau**

\* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.