



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Exo[®]-Zyme L99

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

Protocole identique
pour usage en
bac à ultrason.

Dilution 0,5%




Renouveler la solution dès
qu'elle est souillée au plus
tard toutes les 24 heures.

1



**20 ml / 4 litres
d'eau**

2

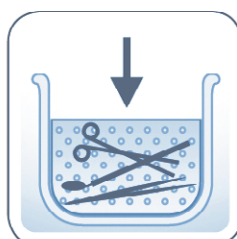

**Immerger
les instruments**

3



**Rincer
abondamment**

⌚ 10 min.

4



**Sécher avec un textile
non tissé ou par insuf-
flation d'air microbiolo-
giquement maîtrisé**

5



**Stériliser
à l'autoclave**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.