



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Rebex® Soft Coffret

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1**

Abraser les surfaces et bords de la prothèse
(Retirer **1 à 2 mm** de résine)
- 2**

Nettoyer parfaitement à l'eau + détergent
- 3**

Sécher soigneusement
- 4**

Appliquer uniformément **Rebex Soft-Bond**
- 5**

Ne pas toucher la surface préparée
- 6**

Laisser sécher à l'air libre
⌚ **environ 1 min.**
- 7**

Extruder **Rebex Soft-Base** jusqu'à mélange homogène
- 8**

L'appliquer uniformément sur toutes les surfaces préparées
mini 2 mm
- 9**

Insérer la prothèse en bouche
(mise en occlusion centrée)
- 10**

Réaliser un enregistrement fonctionnel
- 11**

Auto-polymérisation en bouche
⌚ **4 min.**
- 12**

Retirer les excès
- 13**

Polir délicatement les irrégularités de coupe

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.