



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Rebex® Soft Base

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *


Après
préparation
de la prothèse
selon son
protocole

1




Extruder
Rebex Soft-Base
jusqu'à mélange homogène

2

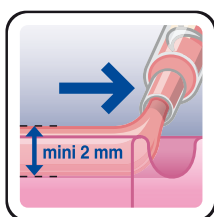


L'appliquer uniformément
sur toutes les surfaces
préparées

3

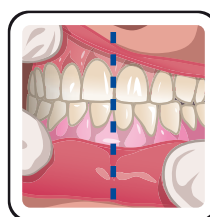


Insérer la prothèse
en bouche
.....
(mise en occlusion centrée)
.....

4

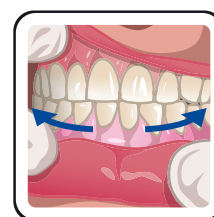

Réaliser
un enregistrement
fonctionnel

5

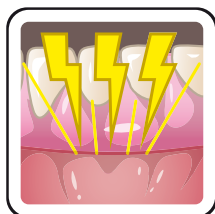

Auto-polymérisation
en bouche

⌚ **4 min.**

6



Retirer les excès

7



Polir délicatement
les irrégularités de coupe

Puis application
de **Rebex Soft-Glass**
selon son protocole

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.