



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Rebex® Soft Glass

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

Lissage
et glaçage
des surfaces
rebasées
et joints
recoupés
ou fraisés

1




Extruder jusqu'à
mélange homogène

2




Appliquer
Rebex Soft-Glass

3

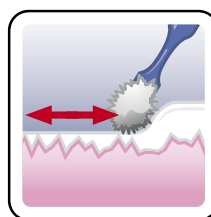

Lisser à l'aide
d'une brosse

4

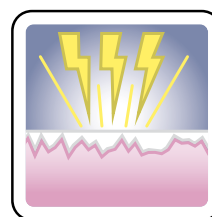

Auto-polymérisation
à température ambiante

 **5 min.**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.