



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Rebex® Hard Coffret

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1**

Abraser les surfaces à rebaser
- 2**

Nettoyer parfaitement à l'eau + détergent
- 3**

Sécher soigneusement
- Si nécessaire : Isoler les zones non concernées de la prothèse (vaseline)**
- 4**

Appliquer uniformément **Rebex Hard-Primer**
- 5**

Ne pas toucher la surface préparée
- 6**

Laisser sécher à l'air libre

environ 15 sec.
- 7**

Extruder **Rebex Hard-Liner** jusqu'à mélange homogène
- 8**

L'appliquer uniformément sur toutes les surfaces préparées

mini 2 mm
- 9**

Insérer la prothèse en bouche (mise en occlusion centrée)

30 sec.
- 10**

Réaliser un enregistrement fonctionnel

environ 1,30 min.
- 11**

S'il est nécessaire de retirer les excès :

Désinsérer la prothèse 2 à 2,30 min. après application de Rebex Hard-Liner

Phase élastique
- 12**

Retirer les excès

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.