



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Oxbond SE2

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1  Rincer abondamment la préparation
- 2  Sécher
- 3  Dosage **1/1**
- 4  Mélanger à l'abri de la lumière
⌚ **5 à 10 sec.**
- 5  Sur émail/dentine légèrement humide
- 6  Application active et généreuse
⌚ **30 sec.**
- 7  Étendre délicatement à l'air
⌚ **10 sec.**
- 8  Photopolymériser
⌚ **20 sec.**

Si la photopolymérisation est impossible ou non souhaitée, OXBOND SE2 est également autopolymérisable :

- Après avoir étendu délicatement OXBOND SE2 à l'air pendant 10 secondes pour éliminer les composants volatils et lisser régulièrement l'adhésif. (La couche de collage doit rester uniforme et collante).
- Mettre en place le matériau de restauration choisi. Le temps de prise en autopolymérisation est de 3 à 5 minutes.

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.