



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



# Oxbond SE1

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! \*

- |   |   |   |  |   |  |  |   |
|---|---|---|--|---|--|--|---|
| 1 |  <p>Nettoyer la surface à traiter</p>                      | 2 |  <p>Rincer abondamment</p>                              | 3 |  <p>Sécher délicatement</p>                 | 4  |  <p>Sur émail/dentine légèrement humide</p> |
| 5 |  <p>Application active et généreuse</p> <p>⌚ 30 sec.</p> | 6 |  <p>Etendre délicatement à l'air</p> <p>⌚ 10 sec.</p> | 7 |  <p>Photopolymériser</p> <p>⌚ 10 sec.</p> |  |   |

\* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.