



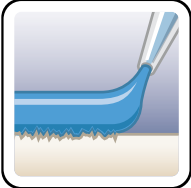
PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Ceram Safe Kit

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1. Sur surface métallique et céramique :

- 1
Bisauter
préalablement
la céramique
- 2
Rendre la surface
métallique
et céramique
rugueuse
- 3

Mordançage
⌚ 5 à 10 sec.
- 4

Rincer abondamment
- 5

Sécher
- 6

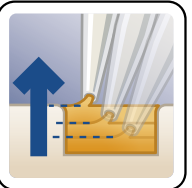
Surface totalement sèche
- 7

Application active
et généreuse sur
métal/céramique
⌚ 10 sec.
- 8

Etendre délicatement
à l'air
⌚ 15 sec.
- 9

Appliquer Compo-Mask
- 10

Etaler uniformément
avec 1 brosse
- 11

Photopolymériser
⌚ 10 sec.
- 12

Appliquer le composite
esthétique choisi selon
son protocole

2. Application de Compo-Mask sur émail/dentine :

- 1
Après
application
de l'adhésif
selon son
protocole :
- 2

Appliquer Compo-Mask
- 3

Etaler uniformément
avec 1 brosse
- 4

Photopolymériser
⌚ 20 sec.



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.