




PROTOCOLE ILLUSTRÉ




Fill-Post LC

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *


Étape 1

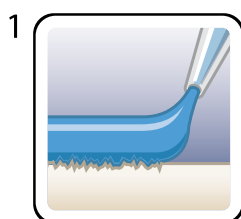

Mordançage

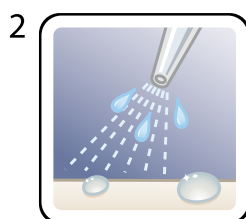


Rincer abondamment

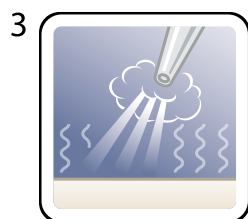

Sécher




La surface traitée doit rester légèrement humide

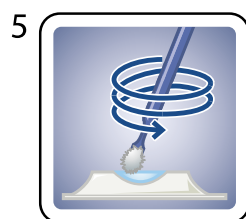


Application active et généreuse

⌚ 30 sec.

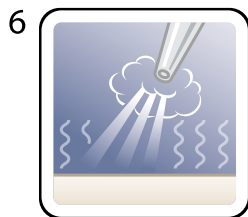

Etendre délicatement à l'air


⌚ 15 sec.

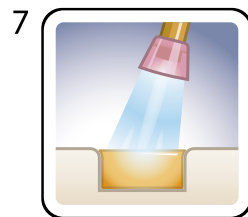

Photopolymériser


⌚ 20 sec.

Étape 2

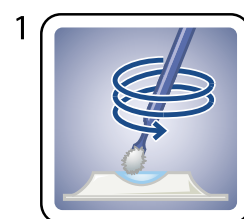


2° application active

⌚ 30 sec.

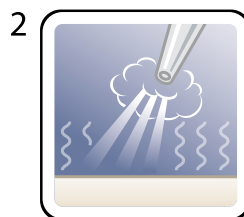

Etendre délicatement à l'air

⌚ 15 sec.

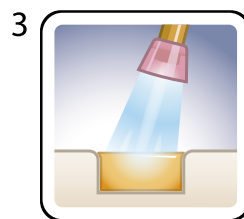

Photopolymériser

⌚ 20 sec.

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.