



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Poly-Core HD

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1. Pour scellement du tenon :

- 1 
Rincer parfaitement
- 2 
Sécher avec une pointe papier
- 3 
Appliquer le collage dual dans la racine
- 4 
Retirer les excès avec une pointe papier
- 5 
Photopolymériser
⌚ 20 sec.
- 6 
Appliquer Poly-core HD à la lumière du canal radiculaire
- 7 
Positionner le tenon
- 8 
Retirer les excès
- 9 
Photopolymériser
⌚ 20 sec.

Après application de l'adhésif selon son protocole :

2. Pour reconstitution du faux moignon :

- 1 
Appliquer de bas en haut
- 2 
Photopolymériser
⌚ 40 sec.
- 3 
Auto-polymérisation
⌚ 3 min.
- 4 
Taille du faux-moignon
- 5 
Polissage

Après application de l'adhésif selon son protocole :

3. Pour obturation de cavité :

- 1 
Extruder jusqu'à mélange homogène
- 2 
Appliquer de bas en haut
- 3 
Auto-polymérisation
⌚ 3 min.
- 4 
Photopolymériser
⌚ 40 sec.
- 5 
Dégraisser à l'alcool



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.