



BRIDGE-UP® CORRECT

MATÉRIAU PHOTOPOLYMÉRISABLE
POUR CORRECTION DE PROTHÈSE PROVISOIRE

BRIDGE-UP® CORRECT, spécialement conçu
pour le rebasage / réparation de prothèse provisoire.





UN COUPLE PRODUIT EXCEPTIONNEL

Bridge-Up® Correct est spécialement conçu
pour s'associer à la résine provisoire
Bridge-Up®



UNE SOLUTION ÉVIDENTE

Correction précise et rapide
de la prothèse provisoire.

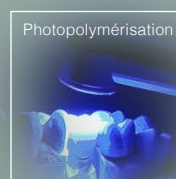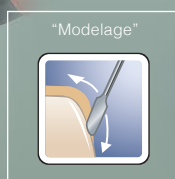

TEINTES

A2

A3



UN USAGE SIMPLE ET PRATIQUE

1. Rebasage :



1 Appliquer
en fine couche
inférieure
à 2 mm



2 Photopolymériser
chaque couche
40 sec.



3 Finition /
Polissage


2. Réparation :



1 Si prothèse
> 24 h, abraser
les surfaces
(sabler ou
fraisier)



2 Appliquer
en fine couche
inférieure
à 2 mm

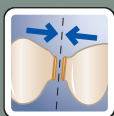

3 Le cas échéant,
coller les parties
fracturées



4 Photopolymériser
chaque couche
40 sec.



5 Finition /
Polissage



• 1 SERINGUE DE 2 ML / TEINTE A2 + EMBOUTS
• 1 SERINGUE DE 2 ML / TEINTE A3 + EMBOUTS
• EMBOUTS AIGUILLES NOIRS LARGES (X25)

RÉF. RE04052
RÉF. RE04053
RÉF. AC04010

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

