



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Sécurifix

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Nettoyer la surface de collage

2



Rincer

3



Sécher

4



Appliquer l'adhésif dual selon son protocole

5



Dosage Sécurifix **1/1**

6



Mélange homogène

🕒 **15 à 30 sec.**


7



Appliquer une fine couche sur l'élément prothétique

0,1 à 0,2 mm

8

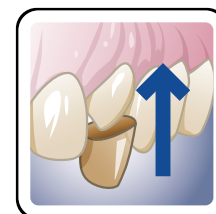

Insérer l'élément prothétique

9



Retirer les excès

10



Photopolymériser le joint périphérique

🕒 **40 sec.**



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.