



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Physio-Cem

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Dosage
1 cuillère / 2 gouttes

2




Mélange homogène
⌚ **30 sec.**

3



Sur préparation
légèrement humide

4

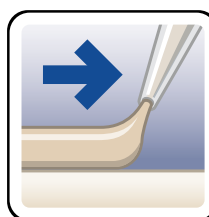

Appliquer le produit

5



Temps de prise

⌚ **3,30 min.**

6



Retirer les excès



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.