



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Tempo-Fix

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Extruder jusqu'à
mélange homogène

2




Sur préparation humide

3




Appliquer Tempo-Fix
dans l'intrados

4

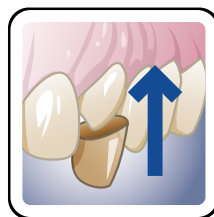

Insérer la dent provisoire

5

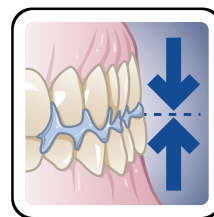

Légère occlusion
du patient

 **2 à 3 min.**

6



Retirer les excès

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.