



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Quick-Cem

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1

Préparer
l'élément
prothétique
selon son
protocole

2




Nettoyer la préparation

3



Appliquer l'adhésif dual
selon son protocole


4

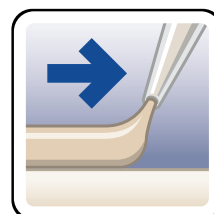

Appliquer une fine couche
sur l'élément prothétique

0,5 mm

5

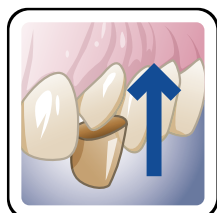

Insérer l'élément prothétique

6



Retirer les excès


7



Photopolymériser
le joint périphérique

20 sec.

8

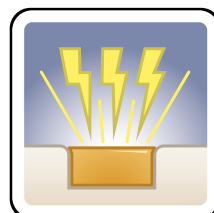

Auto-polymérisation
(phase anaérobie)

3 min.

ATTENTION !



* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.