

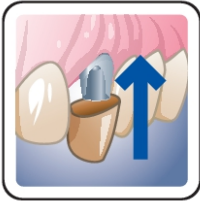


PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Implanto-Cem SP

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1  Dégraissier (ex : à l'alcool)	2  Rincer	3  Sécher	4  Appliquer dans l'intrados
5  Positionner la prothèse et maintenir en pression délicatement  2 min.	6  Photopolymériser les joints périphériques  20 sec.	7  Autopolymérisation  4 min.	8  Retirer les excès



Jeter le bouchon.
Laisser l'embout
après usage

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.