



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Exoseal

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1 
Nettoyer la face occlusale
- 2 
Mordancer la surface à traiter
⌚ **30 sec.**
- 3 
Rincer abondamment
- 4 
Sécher
- 5 
Appliquer Exoseal
- 6 
Etaler Exoseal sur la surface mordancée
- 7 
Retirer les excès
- 8 
Photopolymériser
⌚ **40 sec.**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.