



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



# Master-Bond Dual

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! \*

**MASTER BOND DUAL**

**Étape 1**

1		2		3	
	Mordançage		Rincer abondamment		Sécher
4		5		6	
	Dosage <b>1/1</b>		Mélanger à l'abri de la lumière		Sur émail/dentine légèrement humide
			<b>15 sec.</b>		
7		8		9	
	Application active et généreuse		Etendre délicatement à l'air		Photopolymériser
	<b>30 sec.</b>		<b>15 sec.</b>		<b>20 sec.</b>

**Étape 2**

1		2		3	
	2° application active		Etendre délicatement à l'air		Photopolymériser
	<b>30 sec.</b>		<b>15 sec.</b>		<b>20 sec.</b>

**MASTER BOND (seul)**

**Étape 1**

1		2		3	
	Mordançage		Rincer abondamment		Sécher
4		5		6	
	La surface traitée doit rester légèrement humide		Application active et généreuse		Etendre délicatement à l'air
			<b>30 sec.</b>		<b>15 sec.</b>
7					
	Photopolymériser				
	<b>20 sec.</b>				

**Étape 2**

1		2		3	
	2° application active		Etendre délicatement à l'air		Photopolymériser
	<b>30 sec.</b>		<b>15 sec.</b>		<b>20 sec.</b>



\* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.