



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Metal-Safe

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1 
Sabler /
Mordancer

 - 2 
Rincer abondamment

 - 3 
Sécher

 - 4 
Appliquer
une couche uniforme
et attendre

 **10 sec.**

 - 5 
Étendre délicatement
à l'air

 **10 sec.**

 - 6 
Appliquer le
matériau composite

- 

Replacer le bouchon
immédiatement
après usage

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.