



PROTOCOLE ILLUSTRÉ



Zircon-Safe

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Préparer la surface Zircon
selon les instructions
du fabricant

2



Appliquer
une couche uniforme
et attendre



10 sec.

3




Étendre délicatement
à l'air



10 sec.

4

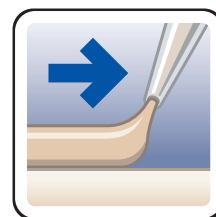

Appliquer le
matériau composite



Replacer le bouchon
immédiatement
après usage

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.