



PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Pistolet capsule Directcaps

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1	2	3	4
			
Activer la capsule à l'aide du pistolet (1 clic) -----	Mélanger la capsule avec 1 vibreur (temps selon notice d'instruction) -----	Retirer l'embout -----	Extruder à l'aide du pistolet (2 clics et +) -----

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.