



EMTACAL CP


RÉSINE BIOACTIVE PHOTOPOLYMERISABLE
À CHARGES MTA INDICUÉE POUR
LE COIFFAGE PULPAIRE



■ Zone de traitement

MATÉRIAU BIOACTIF

Libère des ions calcium et hydroxyde
→ stimule la formation de tissu dentinaire,
formation d'apatite, protection de la pulpe.

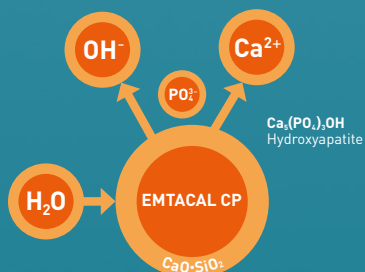

Le liquide dentinaire pénètre dans la couche d'EMTACAL CP.
Cela conduit à une libération d'ions calcium et hydroxyde.
La dent réagit avec formation d'hydroxyapatite et de dentine tertiaire.

pH ALCALIN 12

Effet bactéricide
→ favorise la guérison et protège des sensibilités.

MANIPULATION SIMPLIFIÉE

- Application très précise (thixotrope) grâce aux aiguilles fournies, même dans les cavités profondes.
- Photopolymérisation : 40 secondes
- Le traitement peut être poursuivi immédiatement après photopolymérisation

CARACTÉRISTIQUES PARFAITEMENT ADAPTÉES

- Insoluble
- Thixotrope
- Haute radio-opacité
- Résistance à la compression : 90 Mpa
- Dureté Barcol : 50-70



• 1 SERINGUE 1 ML + ACCESSOIRES

RÉF. EN04001

Dispositifs Médicaux Classe IIa

Lire attentivement la notice d'instruction.
Usage strictement réservé aux
professionnels de l'art dentaire.

Fabriqué exclusivement
pour Exotec Dentaire®

SanaPro Dental GmbH
D-27570 Bremerhaven
(Germany)

