


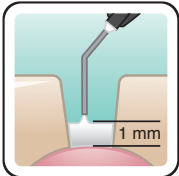

PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Emtacal CP

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

- 1 
Préparer la cavité
(maîtriser l'hémorragie pulpaire)
- 2 
Sécher sans assécher
- 3 
Appliquer
EMTACAL CP
(épais. $\leq$ 1mm)
- 4 
Photopolymériser
⌚ **40 sec.**
- 5 
Appliquer un adhésif
photopolymérisable
et obturer la cavité



Replacer le bouchon
immédiatement
après usage



■ Zone de traitement

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.