



PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Entamix

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1




Préparer et nettoyer le canal (digue recommandée)

2



Sécher sans assécher

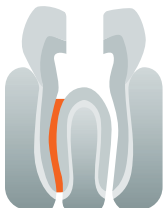


Zone de traitement

3




Extruder EMTAMIX jusqu'à mélange homogène

4

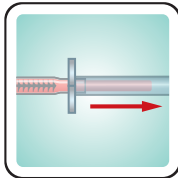


Transférer EMTAMIX dans la seringue d'application

5

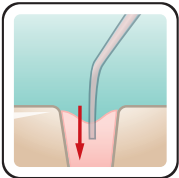


Appliquer dans le canal

6

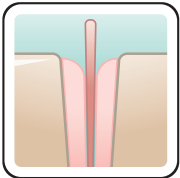

Positionner une pointe de gutta

7

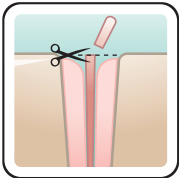

Couper et condenser la pointe de gutta

8



Photopolymériser




10 min.

temps de travail

(Utiliser alternativement un bloc de mélange et appliquer EMTAMIX à l'aide d'un Lentulo)

40 sec.

9

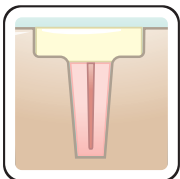

Obturer provisoirement **ou** reconstitution coronaire composite



Jeter le bouchon. Laisser l'embout et remettre en sachet aluminium après usage.

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.