



PROTOCOLE ILLUSTRÉ

Astralight Home 16 PC - Refill

Lire attentivement la notice d'instruction avant usage ! *

1



Se rincer la bouche
à l'eau et
se laver les dents

2



Appliquer le produit
sur la face de la gouttière
qui sera en contact avec
la surface dentaire
à éclaircir

3



Placer la gouttière
en bouche

La retirer au bout de
 **30 à 40 min.**

4



Nettoyer la gouttière
à l'eau froide à l'aide
d'1 brosse à dent et
rincer abondamment



*Ne pas mordre
excessivement.
Ne pas avaler le produit.
Ne pas boire ni manger
pendant le traitement.*

5

**Répéter le traitement quotidiennement
pendant 3 à 4 semaines
(1 seringue 3 ml / semaine)**

* Le protocole illustré est un aide mémoire. Il ne remplace en aucun cas la lecture préalable de la notice d'instruction avant usage.