



NOTICE D'UTILISATION - ASTRALIGHT HOME 16 PC

DESCRIPTION

ASTRALIGHT HOME 16 PC est un matériau d'éclaircissement dentaire dont la concentration en particule active (16% peroxyde de carbamide / 4.4% peroxyde d'hydrogène) permet une utilisation à domicile par le patient, après consultation et indication du chirurgien-dentiste.

INDICATIONS / UTILISATION PREVUE

- ✗ Eclaircissement dentaire sur dent vivante et dévitalisée

PROTOCOLE D'UTILISATION

1. Préparation de la gouttière

- ✗ Placer la gouttière dans de l'eau **bouillante pendant 8 à 10 secondes** de manière à ramollir le matériau.
- ✗ Placer la gouttière en bouche et la façonner manuellement la bouche fermée.
- ✗ Retirer la gouttière et la rincer à l'eau froide.

Si après modélisation, la gouttière présente de petites imperfections au niveau des limites, il est possible de les éliminer à l'aide de ciseaux.

2. Application

La première utilisation doit être réalisée ou supervisée par le chirurgien-dentiste à l'occasion d'une consultation en cabinet dentaire de manière à assurer l'utilisation correcte et sécurisée du produit par le patient qui réalisera lui-même, à domicile, la suite du traitement.

 *Avant tout traitement, s'assurer que les dents ont été nettoyées (brossage et fil dentaire recommandé).*

- ✗ Retirer le capuchon de la seringue de ASTRALIGHT HOME 16 PC
- ✗ Appliquer le produit sur la face vestibulaire des gouttières (face qui sera en contact avec la surface dentaire à éclaircir).
- ✗ Placer les gouttières en bouche.

 *Ne pas mordre excessivement. Ne pas avaler le produit. Ne pas boire ni manger pendant le traitement.*

- ✗ Retirer les gouttières au bout de **30 à 40 minutes**.
- ✗ Nettoyer la gouttière et rincer abondamment à l'eau.

 *Nettoyer la gouttière à l'eau froide et à l'aide d'une brosse à dents (possible avec du dentifrice). Brosser toutes les surfaces et interstices. Ne pas laver à l'eau chaude. Ne pas placer à proximité d'une source de chaleur.*

- ✗ Se rincer la bouche à l'eau et se laver les dents.
- ✗ Répéter le traitement quotidiennement pendant 3 à 4 semaines (une seringue de 3 ml / semaine)

 *Ne pas consommer dans les 72 heures qui suivent le traitement : Tabac, café, thé, cola, vin rouge, vin rosé, jus, artichaut, betterave, cerise, fraise, mûre, framboise, grenade, pastèque, raisin noir, chocolat, cacao, carotte, brocoli, épinard, sauce tomate cuisinée, plat avec colorant / safran.*

STOCKAGE

Conserver le produit au réfrigérateur à une température comprise entre 9 et 14°C. Ne pas utiliser après la date d'expiration !

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- ✗ Distribution et première utilisation exclusivement réservée aux chirurgiens-dentistes.
- ✗ Ne pas avaler.
- ✗ Les traitements prolongés aux peroxydes ne sont pas recommandés. Interrompre le traitement en cas de sensibilité ou réactions inhabituelles.
- ✗ L'usage du produit chez le consommateur d'alcool ou de tabac n'est pas recommandé.
- ✗ Ne pas utiliser chez la femme enceinte et l'enfant de moins de 18 ans. L'usage du produit après restauration dentaire ou en cas de lésion gingivale n'est pas recommandé.
- ✗ Eviter le contact avec les yeux.
- ✗ En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.
- ✗ Fiche de données de sécurité disponible sur www.exotec-dentaire.com.

PRÉSENTATION

Référence commerciale	Libellé	Contenu
ES01001	ASTRALIGHT HOME 16 PC STARTER KIT	4 seringues de 3ml + accessoires
ES01002	ASTRALIGHT HOME 16 PC REFILL	10 seringues de 3ml

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Ce produit est uniquement garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication et doit être strictement mis en œuvre selon la notice d'instruction. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage qu'il en fait. Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, la seule et unique obligation légales d'EXOTEC DENTAIRE est la réparation ou le remplacement du produit sans autre possibilité de recours. Sauf disposition contraire de la loi, EXOTEC DENTAIRE ne saurait être tenue pour responsable de la perte de ce produit ou de dommages causés, qu'ils soient directs, indirects, spécifiques, secondaires ou majeurs indépendamment de l'argument juridique avancé dont la garantie elle-même, le contrat, une négligence ou la responsabilité.



Fabriqué exclusivement pour Exotec Dentaire®
2 rue Aristide Berges
21800 Sennecey-Les-Dijon
03 80 47 06 18
contact@exotec-dentaire.com
www.exotec-dentaire.com



Dentalsur 2003, S.L.
Avda. Ortega y Gasset,
152 Pol. Alameda
29006 Malaga - Espagne