	TECHNICAL DATA SHEET	
	Disinfectant detergent spray	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

PRODUCT	DETERG DESINF SIN ALCOHOL SUPERF 5L PROC	
REFERENCE	49889	
COMPANY	USF Healthcare S.A. Rue Francois Perreard 4 Case postale 142 CH-1225 Chene Bourg - Geneve	
CLASSIFICATION	CLASS IIb MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	

Indicaciones:

Solución detergente desinfectante para el tratamiento de dispositivos médicos en entornos dentales.

Características principales del producto:

- Producto listo para su uso.
- Formula que asegura una amplia compatibilidad con los materiales sintéticos, plásticos,...
- Formulado sin alcohol, sin perfume ni colorante.
- Spray espumoso que limita el efecto aerosol y que permite visualizar la aplicación del producto.
- Amplio espectro de acción antimicrobiana desde 1 minuto.
- pH del producto: ≈ 6 .
- Sin sustancias CMR*, sin aldehídos.
- No clasificado como peligroso para el medio ambiente.


**Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

Composición:

Cloruro de didecildimetilamonio, excipientes.

Propiedades microbiológicas:

- Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 13697 – 2 minutos.
- SARM: EN 13727, EN 13697 – 2 minutos.
- Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 – 5 minutos.

	TECHNICAL DATA SHEET	
	Disinfectant detergent spray	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

- Activo según EN 14476 sobre Herpesvirus, PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Vaccinia virus, VIH-1 – 1 minuto. Activo según EN 14476 sobre Poliomavirus SV40 – 5 minutos.

Acondicionamiento:

- Envase pulverizador de 750 ML.
- Garrafa de 5 litros.

Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

1. Pulverizar el producto sobre una tela no tejida o directamente sobre la zona que se desee limpiar y desinfectar.
2. Frotar bien la zona con una tela no tejida asegurándose de tratar el área de manera completa.
3. Dejar actuar según el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana deseada. El enjuago no es necesario, salvo si existen posibilidades de que el dispositivo médico entre en contacto con mucosas.

Precauciones de uso:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIb CE0459. Antes de utilizar, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +35°C.