
	TECHNICAL DATA SHEET	
	Proclinic toallitas desinfectante	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

PRODUCT	Proclinic toallitas desinfectante	
REFERENCE	49898	
COMPANY	USF Healthcare S.A. Rue Francois Perreard 4 Case postale 142 CH-1225 Chene Bourg - Geneve	
CLASSIFICATION	CLASS IIa MEDICAL DEVICE Directive 93/42/CEE	

Indicaciones:

Toallitas impregnadas de una solución desinfectante para la desinfección rápida de superficies de los dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles.

Características principales del producto:

- Toallitas listas para usar.
- Amplio espectro de acción antimicrobiana en tan solo 30 segundos.
- No dejan manchas ni residuos.
- Excelente compatibilidad con los metales.
- Tamaño de la toallita: 130 mm x 190 mm.
- Olor a limón.
- pH de la solución de impregnación: $\approx 5,5$.
- Porcentaje de alcohol la solución de impregnación: 60% v/v.
- Sin aldehídos, sin sustancias CMR*.


**Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

Composición de la solución de impregnación:

Etanol, proprionato de amonio cuaternario, perfume.

Propiedades microbiológicas:

- Bactericida: EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14561 (incluido SARM) – 30 segundos.
- Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 – 30 segundos.
- Levuricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 30 segundos.

	TECHNICAL DATA SHEET	
	Proclinic toallitas desinfectante	12/ene/2017
	PROCLINIC	VERSION: 01

- Activo sobre VIH-1, PRV (Virus modelo de Hepatitis B), BVDV (Virus modelo de Hepatitis C), Herpesvirus, Rotavirus, Adenovirus, Coronavirus (virus modelo SARS) – 30 segundos.

Acondicionamiento:

- Bote de 100 toallitas.
- Reposición de 100 toallitas.

Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

Las Proclinic toallitas desinfectante 30" se utilizan para desinfectar dispositivos médicos no invasivos que ya hayan sido limpiados previamente. Producto listo para usar, para un solo uso. Antes de aplicarlo, verificar que la zona que se desee tratar sea compatible con el alcohol. Asegurarse de que los dispositivos que se vayan a desinfectar estén apagados.

1. Retirar la toallita del envase, tirando horizontalmente, y separarla con un tirón.
2. Aplicar la toallita sobre la zona previamente limpia que se vaya a desinfectar.
3. Dejar que la solución actúe 30 segundos, como mínimo. NO ENJUAGAR.
4. Después de cada uso, asegurarse de que el envase quede bien cerrado.

Precauciones:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIa, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +25°C.