

LARIDENT SRL

REF. : G29 SUPPORTO IN PLASTICA AUTOCLAVABILE PER SPUGNETTE ENDODONTICHE

G29 PLASTIC ENDODONTIC INSTRUMENT CLEANER, CLOSED BASE

CONSIGLI PER LA STERILIZZAZIONE

- **Pulire accuratamente prima di posizionarlo in autoclave**
- **Sterilizzare in autoclave 134°C . Si raccomanda di utilizzare il ciclo a 121°C.**
- **Ciclo fino a 50x**
- **Evitare la presenza di metalli in autoclave**

STERILIZATION INSTRUCTION

- **Rinse the disinfection materials thoroughly before autoclaving**
- **Autoclavable up to 134°C. We recommend the safety program of 121°C**
- **Cycle up to 50x**
- **Please avoid contact with metal instrument when autoclaving**

