

Data ultima revisione / Last revision date / Date de la dernière révision: 21/05/2020

DENOMINAZIONE PRODUCT NAME NOM DU PRODUIT	MONOART® Tappeto decontaminante multistrato Multilayer decontamination mat Tapis de décontamination multicouche Alfombra de descontaminación multicapa
DESCRIZIONE PRODUCT DESCRIPTION DESCRIPTION DU PRODUIT	Tappeto decontaminante adesivo multistrato removibile semirigido. Semirigid decontaminant multilayer adhesive mat. Tapis adhésif multicouche semi-rigide décontaminant
CARATTERISTICHE FISICHE PHYSICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Dimensioni tappeto: 1150/1200 x 450 x 1,4 mm. Peso tappeto singolo: 0,71 kg. Colore: Blu. Materiali: Polietene a bassa densità. Antibattere: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopolo. Mat dimensions: 1150/1200 x 450 x 1,4 mm. Mat weight: 0,71 kg. Colour: Blue. Materials: LOW DENSITY POLYTHENE. Antibacterial: 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopole. Dimensions tapis : 1150/1200 x 450 x 1,4 mm. Poids du tapis : 0,71 kg couleur : Bleu. Matériau : POLYÉTHYLÈNE BASSE DENSITÉ. Antibactérien : 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one + 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT/MIT) + Bronopole.
ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA' DANGER LABELLING ÉTIQUETAGE DE DANGER	N/A
INFORMAZIONI DI SICUREZZA SAFETY INFORMATION INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	Contatto con la pelle: in caso di soggettiva ipersensibilità sciacquare con acqua fredda, coprire con garza asciutta e consultare il medico. In case of subjective hypersensitivity, rinse with fresh water, cover with dry, clean gauze and see a physician. En cas d'hypersensibilité subjective, rincez à l'eau douce, couvrez avec une gaze sèche et propre et consultez un médecin.
SCHEDA DI SICUREZZA SAFETY DATA SHEET FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ	Fornita a parte. Supplied separately. Fournis séparément.
DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS DIRECTIVES ET/OU NORMES DE RÉFÉRENCE	Dispositivo medico di classe I non sterile. Codici: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND t030501. Class I non sterile medical device. Codes: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND t030501. Dispositif médical non stérile de classe I. Codes: UMDNS 11740; GMDN 44011; CND t030501.
STOCCAGGIO STORAGE	Conservare in luogo asciutto lontano da forti fonti di calore / Umidità relativa suggerita : 60% / Proteggere dai raggi diretti del sole / Conservare nella confezione originale. Store in a dry place away from strong heat sources / Suggested relative umidity: 60% / Protect from direct sunbeams / Store in its original package.

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Toutes les informations techniques divulguées ici nous sont fournies par nos fournisseurs de matières premières, sous leur propre responsabilité.

STOCKAGE	Conservare dans un endroit sec, à l'écart de toute source de chaleur forte / Humidité relative suggérée: 60% / Protéger des rayons directs du soleil / Conservare dans son emballage d'origine.
DURATA	La durata di ogni foglio adesivo dipende unicamente dalle condizioni di utilizzo. 3 anni se correttamente conservato.
DURATION	The lifetime of each adhesive sheet depends exclusively on its usage. 3 years from date of manufacture if stored at the recommended conditions.
DURÉE	La durée de vie de chaque feuille adhésive dépend exclusivement de son utilisation. 3 ans à compter de la date de fabrication si le produit est stocké dans les conditions recommandées.
CONFEZIONI	Confezione da 4 pezzi, ciascuno da 30 fogli adesivi rimovibili. Dimensioni confezione: 1270 x 600 x 17 mm; 4,63 kg.
PACKAGES	Pack of 4 pieces, each of 30 removable adhesive sheets. Package dimensions: 1270 x 600 x 17 mm; 4.63 kg.
PAQUETS	Paquet de 4 pièces, chacune de 30 feuilles adhésives détachables. Dimensions de l'emballage : 1270 x 600 x 17 mm; 4,63 kg
SMALTIMENTO	In conformità alle leggi nazionali e alle regole riguardanti lo smaltimento delle materie plastiche.
DISPOSAL	In respect of local laws and regulations concerning disposal of plastic materials.
ÉLIMINATION	Dans le respect des lois et règlements locaux concernant l'élimination des matières plastiques.
MODALITA' D'USO	1. Pulire ed asciugare con cura la zona del pavimento dove si intende posare il tappeto. 2. Rimuovere il foglio protettivo inferiore bianco. 3. Far aderire il tappeto al pavimento avendo cura di non procurare piegature. 4. Rimuovere il foglio protettivo superiore. 5. <u>Evitare di bagnare la superficie del tappeto e di transitare sullo stesso con suole bagnate.</u> 6. Rimuovere progressivamente, con l'uso, i 30 fogli adesivi.
MODE OF EMPLOY	1. Clean and dry up the surface where the mat is going to be placed. 2. Remove the transparent lower protective sheet. 3. Make the mat smoothly adhere to the floor. 4. Remove the upper protective sheet. 5. <u>Avoid contact with water and transit with wet soles.</u> 6. <u>Progressively remove each of the 30 disposable adhesive sheets when dirty.</u>
MODE D'EMPLOI	1. Nettoyez et séchez la surface où le tapis va être placé. 2. Retirez la feuille de protection inférieure transparente. 3. Faites en sorte que le tapis adhère doucement au sol. 4. Retirez la feuille de protection supérieure. 5. <u>Évitez le contact avec l'eau et le transit avec des semelles mouillées.</u> 6. <u>Retirez progressivement chacune des 30 feuilles adhésives jetables lorsqu'elles sont sales.</u>

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable