

Scheda informativa sul prodotto

MD 550 pulente per sputacchiere



MD 550 in sintesi

- Soluzione pronta all'uso priva di aldeidi per la contemporanea pulizia e cura di sputacchiere di riuniti odontoiatrici - con azione antimicrobica.
- Azione pulente eccezionalmente profonda - elimina facilmente residui di calcare, sangue, agenti rivelatori della placca batterica, materiali da impronta, ecc.
- Efficace contro batteri, batteri Tbc e lieviti.
- Testato secondo le norme europee.
- Ottima compatibilità con i materiali - non contiene agenti abrasivi; non graffia le sputacchiere, non lascia residui abrasivi.
- Non fa schiuma - è idoneo per tutti gli impianti con separatore di amalgama.

Proprietà

MD 550 della linea Dürr System-Higiene è un preparato speciale pronto all'uso, privo di aldeidi, con azione antimicrobica per la contemporanea pulizia e cura di sputacchiere di riuniti odontoiatrici. A differenza dei detergenti tradizionali, MD 550 è ideale per tutti gli impianti con separatore di amalgama. MD 550 elimina residui di calcare, sangue, agenti rivelatori della placca batterica, materiali da impronta, ecc. MD 550 è caratterizzato da un'eccezionale azione pulente e da un'ottima compatibilità con i materiali. MD 550 agisce in profondità, lascia un gradevole profumo e non produce schiuma. Il preparato non contiene agenti abrasivi, pertanto previene la graffiatura delle sputacchiere e la formazione di residui.

Composizione del prodotto

MD 550 contiene una combinazione di alcol come principi attivi. 100 g di MD 550 contengono 40 g di etanolo, tensioattivi, acidi organici, additivi e salicilato di benzile in soluzione acquosa.

Efficacia microbiologica

MD 550 è efficace contro i batteri¹⁾, i batteri Tbc¹⁾ e i lieviti¹⁾. Prodotto testato in conformità alle norme EN 13727, EN 13624, EN 14348.

1) Test con carica ridotta (EN 13727, EN 13624, EN 14348).

Uso

MD 550 si utilizza non diluito. Spruzzare un po' di MD 550 nella sputacchiera e distribuire in modo uniforme con una spazzola. Lasciar agire brevemente MD 550, poi risciacquare con acqua. Il tempo di azione è di 2 minuti. Utilizzare MD 550 in base alle esigenze, comunque sempre ogni sera prima di disinfettare l'impianto di aspirazione.

Impatto sull'ambiente

MD 550 è ecologicamente sicuro, poiché tutti i principi attivi e le altre sostanze organiche sono biodegradabili nelle acque di scarico a condizione che vengano adeguatamente diluiti. La confezione in polietilene può essere destinata sia al recupero materiale che alla termovalorizzazione. Ai fini del riciclaggio, sciacquare il flacone.

Scheda informativa sul prodotto

MD 550 pulente per sputacchiere

Dati fisici

Aspetto: liquido limpido, incolore, leggermente viscoso

Densità: $D = 0,94 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

pH: $2,5 \pm 0,5$

Viscosità: circa 80 s (DIN 53211)

Punto di infiammabilità: 23 °C (DIN 51755)

Durata

3 anni

Confezione

Flacone da 750 ml

Conservazione

Conservare il preparato ad una temperatura compresa tra 5 °C e al massimo la temperatura ambiente.

Avvertenze generali

Non versare nelle sputacchiere detergenti o disinfettanti abrasivi o schiumogeni. Prestare attenzione in caso di materiali sensibili all'alcol (ad es. vetro acrilico, ecc.). Il prodotto è soggetto ad alterazioni di colore/odore, soprattutto se non viene conservato al riparo dalla luce solare. Queste alterazioni di colore e/o odore non influenzano tuttavia le prestazioni disinfettanti del prodotto.

Avvertenze relative ai pericoli

MD 550 è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP: vedere l'etichettatura del prodotto e la scheda di dati di sicurezza.

Perizie indipendenti - indagini interne

Le perizie sono disponibili su richiesta.

CE 0124

Distributore

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Produttore

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de