

L'arte di dipingere la ceramica.



*initial*<sup>TM</sup>

Soluzioni per dipingere

Lustre Pastes NF  
Spectrum Stains

**GC**




# Dipingete la vostra estetica con Initial™ di GC

GC offre agli utilizzatori di Initial le soluzioni per la ceramica più moderne ed estetiche applicabili con il pennello. In base ai requisiti del caso specifico e alle proprietà desiderate, GC offre due linee di prodotti, **Initial Lustre Pastes NF** e **Initial Spectrum Stains**, che permettono di ottenere il risultato atteso. Esse sono disponibili per un'ampia gamma di CTE e dunque vi permettono di lavorare con la gamma completa di ceramiche GC Initial e quasi tutti i tipi di altre ceramiche.

**Initial Lustre Pastes NF**, le speciali ceramiche tridimensionali di GC applicabili con il pennello, aggiungono profondità e autenticità a tutti i vostri preziosi manufatti ... con il semplice uso del pennello. Non è più necessario eseguire complesse procedure di stratificazione o cicli di cottura extra per ottenere una vitalità insuperabile e una glasura naturale per tutti i vostri restauri.

**Initial Spectrum Stains** offrono un effetto di colorazione bidimensionale e possono essere utilizzati per la colorazione sia interna che esterna. Essi permettono di ottenere un risultato finale molto raffinato con una superficie lucida ma conservando contemporaneamente la struttura superficiale.

I due prodotti sono complementari. In alcuni casi vengono utilizzati insieme: ad esempio, si possono aggiungere Spectrum Stains alle Lustre Pastes NF oppure alle polveri per la stratificazione della ceramica.

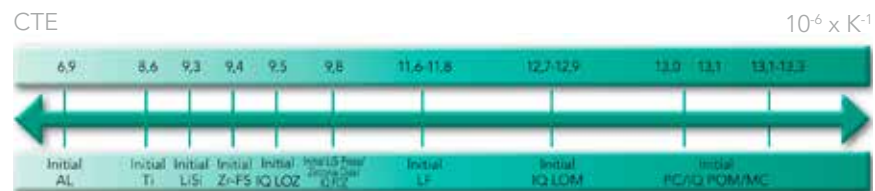

Compatibilità con la linea di ceramiche Initial




## Lustre Pastes NF – V-Shades

Con le masse "Body A-D", si possono ottenere i colori Vita necessari in modo molto facile e veloce. Con gli altri colori disponibili, si possono ulteriormente caratterizzare i restauri per ottenere un risultato finale perfettamente assimilato.



## Lustre Pastes NF Gum Shades

Le masse Gum Shades si basano su una scelta ponderata di particelle di ceramica color rosa e non fluorescenti per riprodurre perfettamente l'aspetto delle gengive naturali. Sarà facile ottenere una transizione vitale dal margine della corona alla gengiva.

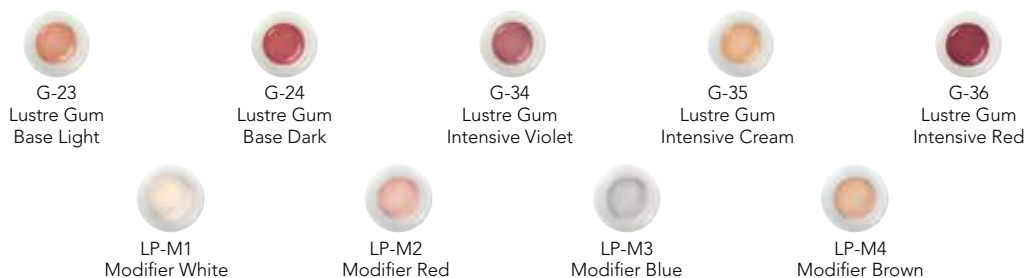

## Spectrum Stains

I supercolori e la glasura sono stati sviluppati per la colorazione esterna e la glasura di materiali ceramici del medesimo colore dei denti e l'individualizzazione interna delle ceramiche per stratificazione. Compatibili con un'ampia gamma di CTE, i supercolori Initial Spectrum Stains si adattano perfettamente a tutti i tipi di ceramiche dentali. Essi sono stati adattati in particolare al concetto di colore estetico del portafoglio di ceramiche Initial.

Initial Spectrum Stains sono supercolori in polvere disponibili in una gamma di 16 colori che danno forza all'estetica dei vostri restauri.

Indipendentemente dalla modalità di applicazione, si ottiene sempre un risultato finale molto raffinato, mantenendo la struttura superficiale e garantendo un livello di lucidità ottimale.



# Initial Lustre Pastes NF per una bellezza superficiale eccellente

## La finitura perfetta per i vostri restauri

Non è più necessario utilizzare complesse procedure di stratificazione o cicli di cottura extra per ottenere una vitalità insuperabile e una glasura naturale per tutti i vostri restauri. Con Initial Lustre Pastes NF, potete ottenere profondità di colore e traslucenza vitale ... applicandoli semplicemente con il pennello.

Le Initial Lustre Pastes NF si basano su uno speciale mix di particelle di ceramica fini. I passaggi per completare i vostri manufatti rimangono identici, indipendentemente dalla tecnica impiegata per creare la base. Utilizzando il liquido di diluizione, la consistenza rimane ottimale fino alla fine.

Per ottenere i colori Vita richiesti, si applicano le Lustre Pastes NF "Body A-D". Questo processo comprende in sé tutto ciò che serve per creare i colori Vita in pochissimo tempo.

Per una caratterizzazione più marcata basterà usare gli altri colori disponibili per ottenere risultati dall'estetica eccellente.



Base



Applicazione di LP Neutral



Applicazione di Body Shades



Restauro finale in cui si possono apprezzare colore e lucentezza

## Modifiche facili

Con le Initial Lustre Pastes NF potete facilmente modificare i vostri manufatti.

Modificare la brillantezza del colore, il valore di grigio o aggiungere lucidità superficiale extra non è mai stato così facile!



Brillantezza



Colore



Valore di grigio

“Le ceramiche  
applicate al pennello  
consentono una  
rappresentazione  
concreta delle  
emozioni più sottili”



# Aggiungete carattere ai vostri restauri mono-massa...

La speciale consistenza garantisce omogeneità nelle modifiche e nell'aspetto. La struttura e la levigatezza superficiali dello strato delle Lustre Pastes NF sono ottenibili facendo vibrare delicatamente o condensando il restauro. Non servono procedure di stratificazione complesse o cicli di cottura supplementari. Sono veloci, facili e sicure. Le paste sono pronte all'uso con una proprietà tissotropica raffinata, per un'applicazione semplice e precisa.



I framework di forma anatomica completa in disilicato di litio, ad esempio quelli realizzati con LiSi Press, possono essere individualizzati con le Lustre Pastes NF.



Cercate un modo nuovo per aggiungere vitalità extra ai vostri manufatti monolitici realizzati in zirconia per CAD/CAM, ad esempio con Initial Zirconia Disk? Le Lustre Pastes NF sono la soluzione in ogni caso.



Con i sistemi GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal o Press-over-Zirconia, le caratterizzazioni e la lucentezza possono essere aggiunte in uno solo ciclo di cottura.

... oppure incorporate le paste negli strati  
per ottenere effetti profondi



Cut back



Applicazione delle Lustre Pastes NF (+ cottura)



Applicazione delle masse Opal/Incisal (+ cottura)



Risultato finale

Potete ottenere i risultati estetici più straordinari utilizzando le Initial Lustre Pastes NF con la tecnica di cut-back nei vostri manufatti pressati o stratificati. Dopo aver applicato con il pennello le Lustre Pastes NF, si possono eseguire i ritocchi finali con le ceramiche per faccette dedicate GC Initial: CL-F per una traslucenza elevata e le masse Opal ed Enamel per gli effetti incisali.



# Dipingete la vostra estetica bianca e rosa...

Due set, un solo approccio.



Punto di partenza



Applicazione delle diverse masse Initial Lustre Pastes NF Gum Shades



Caratterizzazione con i colori Vita



Risultato finale



... con transizioni naturali, anche sui framework in zirconia.



A fronte della crescente diffusione della zirconia e dei restauri prodotti con tecniche CAD/CAM, GC offre soluzioni per mantenere i medesimi standard estetici. I vostri restauri monolitici assumeranno un aspetto naturale e vitale con le Initial Lustre Paste NF. La loro speciale composizione permette una maggior interazione con la ceramica sottostante e il loro effetto visivo è analogo a quello delle polveri per stratificazione delle ceramiche, potenziando così l'effetto 3D dei vostri restauri. La semplicità può essere davvero bella!



# Ampliate la gamma di possibilità con i supercolori Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains contengono pigmenti che sono sinterizzati all'interno di una matrice feldspatica per stabilizzarli e consentire di ottenere risultati uniformi e riproducibili. Con Initial Spectrum Stains potete cambiare e giocare all'infinito. Potete usare questi supercolori per la colorazione interna oppure esterna, potete aggiungerli alle masse di ceramica oppure alle Initial Lustre Pastes NF per estendere ancora di più la gamma di possibilità!

## Due consistenze che preservano entrambe la struttura superficiale


I supercolori Initial Spectrum Stains possono essere applicati nella consistenza prescelta dall'utilizzatore, come pasta oppure come prodotto più liquido. Indipendentemente dalla consistenza impiegata, il risultato finale sarà il medesimo: colorazione e lucentezza con una definizione molto fine, conservando al contempo la struttura superficiale del restauro. Sono la controparte in 2D delle Initial Lustre Pastes NF.



Corona con struttura superficiale fine pronta per la glasura



Glasura con consistenza liquida o pastosa

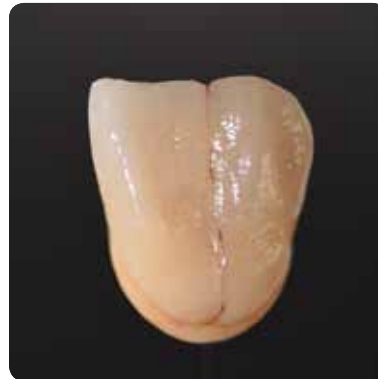

Dopo la cottura: colorazione e glasura con conservazione della struttura superficiale fine



Colorazione interna ...



... o esterna



# Soluzioni per dipingere la ceramica in 2D e in 3D... da GC

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-Shades

- 4 Body Shades e 1 Neutral per realizzare un restauro in colore Vita nel modo più semplice.
- 9 Effect Shades per esprimere tutto il potenziale artistico e dipingere white spot, decalcificazioni, fessure sottili e linee di frattura.

### Composizione del set:

1x Neutral (4g)  
1x Value (4g)  
4x Body Shades (4x4g)  
8x Enamel Effect Shades (8x4g)  
1x Diluting Liquid (8ml)  
1x Refreshing Liquid (8ml)  
1 Blocco di miscelazione  
2 Pennelli  
Scala colori  
Manuale tecnico



Lustre Enamel Effect 9 (Deep Orange) e 10 (Twilight) non fanno parte del set ma sono ordinabili separatamente

## GC Initial Lustre Pastes Set NF - Gum Shades

- 5 paste pronte all'uso nei colori della gengiva con una tissotropicità ideale per un'applicazione facile e precisa.
- 4 Gum Modifiers miscelabili che consentono di esprimere la creatività senza limiti per riprodurre la naturale armonia gengivale.

### Composizione del set:

5x Gum Shades (5x4g)  
4x Stain Modifier for LP NF (4x3g)  
Diluting Liquid (8ml)  
Refreshing Liquid (8ml)  
1 Blocco di miscelazione  
2 Pennelli  
Scala colori  
Manuale tecnico



## GC Initial Spectrum Stains

- 16 supercolori in polvere per la perfezione estetica nei dettagli.
- Due consistenze per un risultato finale raffinato, conservando la struttura superficiale e producendo un grado di lucentezza ottimale.

### Composizione del set:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16x3g)  
1x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10g)  
1x Initial Spectrum Glaze Liquid (25ml)  
Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8g)  
Scala colori per Initial Spectrum Stains



GC EUROPE N.V.

Head Office  
Research Park  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32. 16. 74. 10.00  
Fax +32. 16. 40. 48. 32  
info.gce@gc.dental  
www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1  
I-20098 San Giuliano  
Milanese  
Tel. +39.02.98.28.20.68  
Fax. +39.02.98.28.21.00  
info.italy@gc.dental  
<http://italy.gceurope.com>

**GC**