

Hilgers Bond-a-Braid® and Retainium®

Filò per Retainer Linguale

REF BAB2 per Bond-a-Braid originale in acciaio inossidabile, **REF** RET per Retainium 0.011mm and **REF** XLRET per Retainium 0.016mm

INDICAZIONI D'USO: Bond-a-Braid e Retainium sono concepiti per l'uso come filo per retainer linguale per trattenere i denti in posizione dopo un trattamento ortodontico. BAB2 e RET sono fili 0.011mm.

XLRET è un filo 0.016mm.





Bond-a-Braid non è indicato per chi è allergico al Nickel. Retainium non è indicato per chi è soggetto ad allergie al Titanio.


ISTRUZIONI D'USO:

1. Eseguire la profilassi, poi sabbare o irruvidire lo smalto. Sciacquare e asciugare. Mordenzare lo smalto con acido per 30 secondi, sciacquare ed asciugare completamente.
2. Pre-adattare il filo Bond-a-Braid o Retainium usando un modello per impronta a strappo (snap) per assicurare adeguata lunghezza e adattabilità alla superficie linguale. Per incrementare ulteriormente l'aderenza, il filo può essere sabbato dove dovrà essere incollato.
3. Applicare uno strato di Assure o di resina di incollaggio universale Assure Plus su ogni dente e asciugare leggermente con aria.
4. Collocare 3 anelli di filo dentale colorato nei contatti interprossimali dei centrali e dei laterali.
5. Inserire il Bond-a-Braid o il Retainium negli anelli di filo dentale, posizionare e tirare delicatamente il filo per mantenere il filo metallico nella corretta posizione di incollaggio.
Importante: NON usare il filo dentale per "tirare" il filo metallico in posizione. Questo può curvare il filo metallico e può causare che si incollino un filo metallico attivato, non passivo.
6. Estrudere una piccola quantità di pasta fotopolimerizzabile sul filo metallico, su ogni dente. Usare abbastanza pasta per coprire il filo metallico e incollarlo allo smalto.
7. Utilizzando un piccolo batuffolo, intingere il batuffolo nella resina di incollaggio universale Assure e stendere la pasta con una finitura liscia con un movimento dalla zona gengivale verso quella incisale. Asciugare leggermente con aria.
8. Fotopolimerizzare la pasta su ogni dente per 20 secondi per assicurare un indurimento completo.
9. Rimuovere il filo dentale e controllare eventuali interferenze incisali.

NOTE: Se si usa Bond-a-Braid o Retainium sul superiore 1-1 o 2-2 è consigliabile che sia incorporato un retainer termoplastico trasparente al filo Bond-a-Braid/Retainium per ottenere il miglior risultato.

Incollare per primo il filo del retainer, prendere un'impronta a strappo (snap) e poi realizzare il retainer termoplastico.

   Fumi/polvere generati dalla microabrasione dell'acciaio inossidabile possono causare irritazione agli occhi e al sistema respiratorio  La polvere dell'acciaio inossidabile è infiammabile.

 L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legata all'uso

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products Inc. si assume la responsabilità per sostituire i prodotti nel caso in cui sia provato risultino difettosi. Reliance Orthodontic Products Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o


perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso che intende farne. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legata all'uso




Passo 1 Tagliare un pezzo di filo Retainium della lunghezza desiderata.




Passo 2 Fare una curva di 45° in direzione gengivale alla fine del retainer, di circa 2-3mm. Questa piegatura aiuta a sagomare il filo e lo blocca nell'adesivo, evitando qualsiasi potenziale scivolamento.

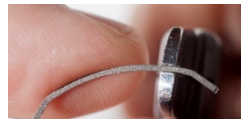

Passo 3 Tenendo il Retainium sul bordo incisivo-gengivale con una pinza piatta, estendere delicatamente una curva gengivale per abbinare quella della superficie linguale

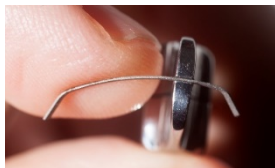

Passo 4 Tenendo il Retainium dal suo bordo piatto con la stessa pinza piatta, estendere delicatamente una curva buccale seguendo l'anatomia della bocca

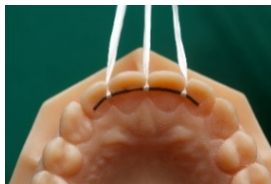

Passo 5 Usando il filo interprossimale, tenere il Retainium contro la superficie linguale del dente (fig.5). Lucidare il Retainium, contro i denti per massimizzare il contatto e il legame.

Solo su prescrizione medica: la legge federale degli USA limita la vendita di questo dispositivo da parte o su prescrizione di un Odontoiatra professionista..

In caso di difficoltà ad interpretare correttamente questa traduzione in italiano delle Istruzioni per l'uso, fanno fede le istruzioni in lingua originale del Fabbricante

ATTENZIONE: Bond-a-Braid contiene Nickel sostanza chimica nota nello Stato di California come causa di cancro. Non applicabile per il Retainium.



Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.
1-800-323-4348 · www.RelianceOrthodontics.com

Scan for additional information



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Australian Sponsor:
Emergo Australia
Level 20, Tower II, Darling
Park 201Sussex St.
Sydney, NSW 2000
Australia

Made in the USA

Check out our new learning
platform Reliance U!
www.RelianceU.tech